

## CZYSZCZENIE URZĄDZENIA PARI PEP® S SYSTEM

### W warunkach domowych

#### 1 Przygotowanie

- Rozłożyć system PARI PEP S na części składowe.

#### 2 Czyszczenie

- Umyć urządzenie w ciepłej wodzie z kranu z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Dokładnie wyplukać poszczególne elementy składowe pod bieżącą ciepłą wodą.
- Przyspieszyć wysychanie przez wytrząśnięcie wody z poszczególnych części.

#### 3 Dezynfekcja

- Wygotować w dostatecznej ilości wrzącej wody przez co najmniej 5 minut **lub**
- Umieścić w dezynfektorze termicznym (np. do butelek dla niemowląt) na co najmniej 6 minut.

#### 4 Suszenie


- Rozłożyć wszystkie części urządzenia na czystej, suchej i chłonnej powierzchni i dokładnie wysuszyć.

#### W przypadku korzystania z urządzenia w warunkach klinicznych

##### Sterylizacja w autoklawie:

Maksymalna temperatura i minimalny czas sterylizacji:  
121 °C, min. 20 minut lub  
132 °/134 °C, min. 3 minuty




**CE**  PARI GmbH  
Spezialisten für effektive Inhalation

Moosstraße 3, 82319 Starnberg, Niemcy  
E-Mail: [export@pari.de](mailto:export@pari.de)  
Tel. +49(0)8151 279 220  
Fax +49(0)8151 279 6220

Strona internetowa firmy PARI: [www.pari.com](http://www.pari.com)

Dystrybutor

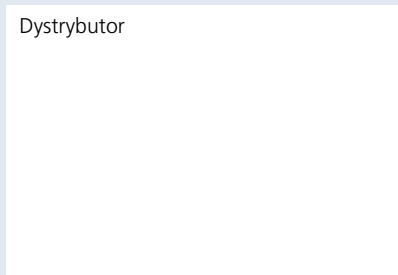

11300698-C-09-2017



**PARI PEP® S SYSTEM**

POŁĄCZENIE TERAPII INHALACYJNEJ

Z FIZJOTERAPIĄ ODDECHOWĄ

Wskazówki dotyczące higieny i korzystania z urządzenia

[www.pari.com](http://www.pari.com)

## TERAPIA **PARI** PEP® S SYSTEM:

- wspomaga mobilizację i odkrztuszenie zalegającej wydzieliny
- może być stosowana również do fizjoterapii oddechowej bez użycia nebulizatora
- może być pomocna, np. dla chorych na mukowiscydozę, astmę czy POCHP

Aby terapia PEP była bezpieczna i dawała najlepszy efekt terapeutyczny, należy zawsze przeprowadzać leczenie zgodnie ze wskazaniami lekarza lub fizjoterapeuty.

PARI PEP S System może być pomocnym uzupełnieniem dla terapii inhalacyjnej. Wspomaga usuwanie wydzieliny z płuc. W czasie wydechu, opór wytwarzany przez PARI PEP S System, zapobiega zjawisku zapadania się oskrzelików obwodowych w płucach, które dzięki temu pozostają dłużej otwarte. W ten sposób odkrztuszenie wydzieliny staje się łatwiejsze oraz poprawia się wentylacja płuc. Celowość terapii w połączeniu z terapią wziewną ustala lekarz.

### Ciśnieniomierz - opcjonalnie dostępny

Ciśnieniomierz służy do ustawienia wartości oporu przy wydechu zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta oraz do kontroli ciśnienia w trakcie terapii.



### Refundacja

Urządzenie PARI PEP S System objęte jest refundacją dla pacjentów chorych na mukowiscydozę i pierwotną dyskinezę rzęsek od 4 roku życia.

